

NEU!

DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

SARS-CoV-2 Antigentest

Schnelle, zuverlässige
Entscheidung am
Point-of-Care




Einfach
Schnell
Präzise

- Schnelles Ergebnis in 15 – 30 Minuten
- Einfache Handhabung, keine zusätzlichen Materialien notwendig
- Probenmaterial: Nasopharyngeal
- Spezifität **99,68%**
- Sensitivität **96,52%**
- Test für den professionellen Gebrauch



nur
9,-
pro Test

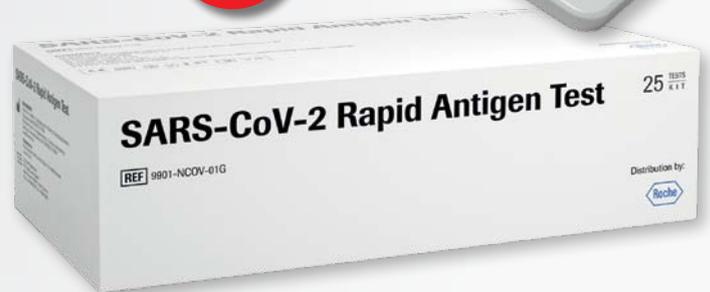


Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis
25 BE	9327592	225,00


Einfache Testdurchführung in 4 Schritten




Ein Abstrich wird durch das medizinische Fachpersonal aus dem Nasen-Rachen-Raum entnommen.

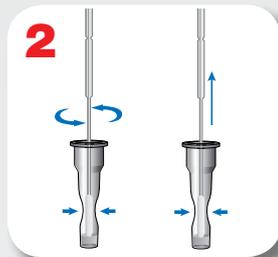

Die Probe wird durch Rotationsdrehung im Extraktionspuffer gelöst. Anschließend kann das Teststäbchen wieder entnommen werden.

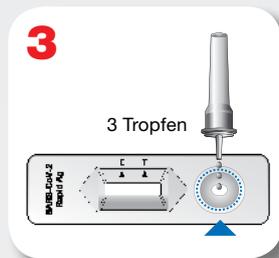

Drei Tropfen der zu testenden Probe werden auf die vorgesehene Probenaufnahme gefüllt.

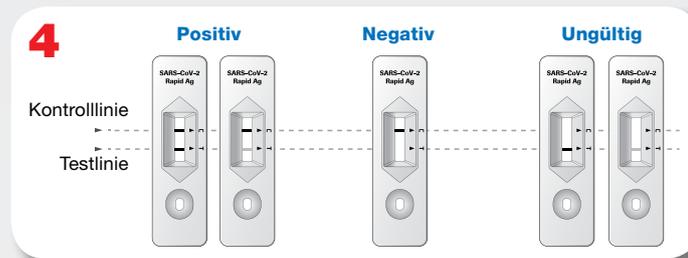

Das Ergebnis kann nach 15 bis 30 Minuten abgelesen werden.

Das Kit ist gebrauchsfertig und enthält alle zur Durchführung eines Tests erforderlichen Materialien.

Die folgenden Komponenten sind im Kit enthalten:

- 25 Teststreifen (einzeln in einem Folienbeutel mit Trockenmittel)
- 25 Extraktionspuffer-Behälter
- 25 Spenderkappen
- 25 Sterile Tupfer
- Folie (kann an den Teststreifen angebracht werden während einer Durchführung im Freien)
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Kurzanleitung

Fordern
Sie Ihr
individuelles
Angebot
an!

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Stand 18.01.2021.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 25 34 / 970 151
Fax: 0 25 34 / 970 270