

NEU!
Jetzt nasaler
Abstrich ausreichend

DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
 für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Corona Antigen Test



Zum qualitativen Nachweis von Nukleocapsid Protein Antigenen aus SARS-CoV-2 in nasalen und nasopharyngealen Tupferproben.


- Qualitatives Ergebnis in 15 Minuten
- Hohe Genauigkeit (98,74%)
Sensitivität (96,72%) und Spezifität (99,22%)
- Lagerung bei Raumtemperatur (2 bis 30°C)
- Lange Haltbarkeit (bis zu 24 Monate)
- Komplettes Zubehör
(Testkassetten, sterile Abstrichtupfer, Extraktionsröhrchen, Tropfeinsätze für Extraktionsröhrchen, Pufferlösung, Ständer für Extraktionsröhrchen, Gebrauchsanweisung)




Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Testform	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis/Pack.
Kassette	10 BE	0230005	85,00

Einfache Testdurchführung

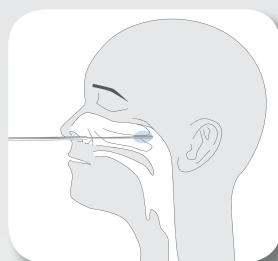

Ein Abstrich wird durch das medizinische Fachpersonal mithilfe des Abstrichtupfers aus dem **Nasen-Raum** oder dem **Nasen-Rachen-Raum** entnommen.

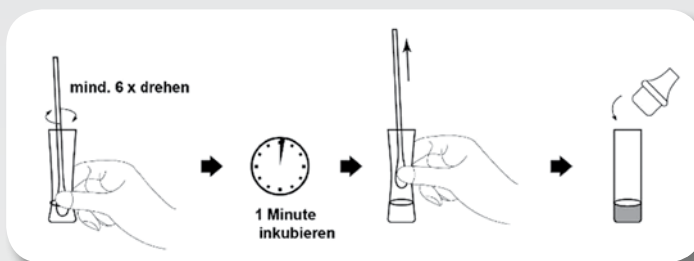

Extraktionsröhrchen in den Ständer stellen, 10 Tropfen Pufferlsg. hinzufügen, Tupfer hineinstellen und mind. 6 x drehen

1 Minute inkubieren

Tupfer anheben und gut ausdrücken (Probenmaterial).

Tropfeinsatz auf das Röhrchen setzen.



Testkassette aus dem Folienbeutel nehmen und auf eine saubere, ebene Fläche legen. 4 Tropfen Probenmaterial in den Probenschacht geben und **Ergebnis nach 15 Minuten** ablesen.

Negativ

Im Kontrollbereich C erscheint eine farbige Linie.
Im Testbereich T erscheint keine farbige Linie.

Positiv

Es erscheinen zwei farbige Linien, eine im Kontrollbereich C und eine im Testbereich T.
Die Intensität der Testlinie T kann, abhängig von der Konzentration des Antigens in der Probe, variieren. Jedes Anzeichen einer Linie sollte als positives Ergebnis betrachtet werden.

Ungültig

Im Kontrollbereich C muss bei der Testdurchführung stets eine rote Linie erscheinen.
Beim Ausbleiben dieser Linie ist der Test in jedem Fall ungültig.
Bitte wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette.

Das Testergebnis muss 15 Minuten nach Zugabe des Probenmaterials abgelesen werden. Nach 20 Minuten ist das Testergebnis nicht mehr interpretierbar!

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 100,- € Netto-Warenwert. Bis 100,- € anteilige Versandkosten 6,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Stand 18.01.2021.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.